

NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation..

- Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2).
- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez**.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez**.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes**



Recommandations de manipulation des masques :

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou une solution hydroalcoolique.

Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.

Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur le visage.

Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

Lorsqu'on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.

Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique

Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux sur le visage.

Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

Tenez le masque par les lanières élastiques. Placez-le au niveau de votre bouche.

Passez les lanières élastiques derrière les oreilles ou derrière la tête. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider (si doté).

Lorsque vous le portez :

Évitez de le toucher et de le déplacer.

Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Recommandations et limites d'utilisation

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger.

Quand il devient difficile de respirer.

Si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries.

Si le masque est endommagé.

Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour retirer le masque :

Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Décrochez pour l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque)

Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac plastique en attendant de le laver

Se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2° et +55° afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Ce masque a été testé pour plusieurs lavages (voir pastille en haut à droite du document). Après tous les lavages indiqués, la filtration du masque n'est plus garantie.

Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer (si doté selon modèle).

Après le lavage :

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).

Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.

Repassez votre masque à la vapeur à la température de 150° maximum.

Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation par exemple)

SÉCURITÉ

Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque. La respirabilité du masque a été mesurée à >96Lm-2 s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4 heures.

Avertissement

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de cas masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.